

## Balance pré-calibrée pour la quantification de l'urine



Instructions pour la mesure de la quantité d'urine lorsqu'on utilise le Protège Bassin/ Urinal Masculin CareBag® avec un tampon super absorbant



L'échelle est graduée de 0 à 1000ml (de haut en bas)

### ETAPE 1 :



Tenez la balance par le plus grand crochet

*Remarque: la balance doit être en position verticale*

### ETAPE 2:



Accrochez le Protège bassin/ Urinal Carebag® sur le plus petit crochet

*Remarque: Attendez que le curseur blanc se stabilise*

### ETAPE 3 :



Lisez le chiffre en face de la partie plate du curseur blanc. Il correspond à la quantité d'urine en ml

*Remarque: la balance est pré-calibrée au poids du sac et du tampon. Aucune conversion, ni calcul n'est nécessaire*

La balance est réutilisable, **NE PAS JETER**

**Instructions pour le nettoyage:** lingettes à base d'alcool et / ou d'eau de Javel peuvent être utilisées pour nettoyer la balance entre deux patients